



## MyClean® AS

### Absauganlagen-Desinfektion



- Konzentrat zur Desinfektion von dentalen Absauganlagen
- Wirkt bakterizid, levurozid und tuberkulozid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV) und Vaccinia-Viren)

#### Eigenschaften

- Geprüft nach DGHM-/EN-Richtlinien EN 13624/EN 13727 zur Instrumentendesinfektion
- Wirtschaftlich aufgrund geringer Anwendungskonzentrationen
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Angenehmer Geruch, keine schädlichen Emissionen

eClass: 30-30-05-01

#### Anwendung

**Konzentrat zur effektiven Desinfektion von dentalen Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.**

Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Inhalt/VE
5 Liter	79637	4046153116676	10306071	2 Kanister
10 Liter	79699	4046153125951	-	1 Kanister



#### Anwendungskonzentration und Einwirkzeit:

Wirksamkeit gemäß der aufgeführten Produkteigenschaften:	2% – 15 Minuten
--	-----------------

#### Dosiertabelle:

Fertige Gebrauchslösung (Liter)	1	2	4	8	10
2,0 %ige Lösung (ml)	20	40	80	160	200

