

COVID-19 Antigen - Schnelltest



MaiMed®

Der in **Deutschland** hergestellte Test überzeugt durch seine leichte Anwendung und ist handlich sowie mobil einsetzbar. Es werden **KEINE** zusätzlichen Instrumente benötigt.

→ Nachweisbarkeit bereits ab 24 Stunden nach einer Infektion!!!

25er Pack




Zuverlässigkeit

- Hervorragend niedrige Nachweisgrenze mit 10 pg/ml
- Sensitivität: 96,8 %
- Spezifität: 99,8 %




Der MEDsan SARS-CoV-2-Antigen Rapid Test ist ein Festphasen-Immunchromatographie-Test zum qualitativen Nachweis spezifischer Antigene aus SARS-CoV-2 in Nasen-/Rachenabstrichproben direkt von Personen, bei denen der Verdacht auf COVID-19 besteht.

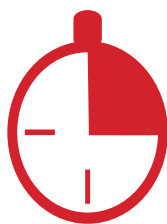

Schnelligkeit

- Durchführungszeit von maximal 10 Minuten
- Testergebnis bereits nach nur 15 Minuten!!!

Ergebnisinterpretation

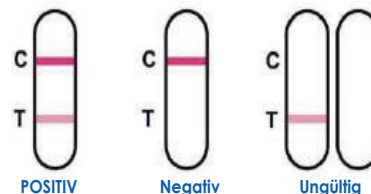

POSITIV

Sowohl die Kontrolllinie C als auch die Testlinie T erscheinen im Reaktionsfeld als rötliche Banden. SARS-CoV-2 Antigene wurden in der Testprobe nachgewiesen. Das Testergebnis ist positiv.

NEGATIV

Ist nur die Kontrolllinie C vorhanden und die Testlinie T fehlt, wurden keine SARS-CoV-2 Antigene nachgewiesen. Das Testergebnis ist negativ.

UNGÜLTIG

Die Kontrolllinie C fehlt oder die Kontrolllinien C und T fehlen. Fehlerhaftes Probenvolumen oder eine falsche Anwendung sind die wahrscheinlichsten Gründe für das Fehlen der Kontrolllinie. Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testkit.



Geprüft und kostengünstig

- Medizinprodukt: CE & IVD
- RKI-gelistet
- Inhalt: Testkassetten, Puffer, Extraktionsröhrchen mit integrierten Dosierspritzen, steriler Probenentnahmetupfer, Packungsbeilage
- Verfügbare Sprachen: 8 (DE, EN, FR, IT, ES, PT, PL, RU)



hygiene-profi-shop.de